

Bruksanvisning

Dosspruta - droplös

1. Ta bort medicinflaskans skruvlock.
Tryck fast adaptern i flaskans hals.
2. Sätt dossprutan i adaptorns hål och vänd flaskan upp och ner.
Mät upp dosen genom att långsamt dra ut kolven till rätt volym.
Avläs skalan mot kolvens översta kant.
Vänd flaskan rätt och ta ut dossprutan.
3. Barnet ska sitta upp när flytande läkemedel ges.
Rikta dossprutans spets mot insidan av kinden.
Tryck långsamt in kolven och låt barnet svälja naturligt.
En alltför kraftig stråle mot svalget kan medföra obehag.
4. Rengör dossprutan invändigt efter varje användningstillfälle.
Förvara dosspruta och läkemedel oåtkomligt för barn.



Dossprutan är avsedd för en enskild behandlingsperiod med flytande läkemedel.