

Bruksanvisning

Rektalväska för engångsbruk

Före användning

Läs igenom hela bruksanvisningen.

Vid användning

- Ta bort skyddshylsan över pipen.
- Trä in handen i plastpåsen och fatta kring flaskan.
- Ligg på sidan och för in pipen i analöppningen. Införandet kan underlättas genom att smörja in pipen med ett tunt lager vaselin.
- Krama långsamt ihop flaskan så att lösningen töms i ändtarmen.
- Drag ut pipen när flaskan är tömd.
- Genom flaskans speciella utformning finns ingen risk för återsug.
- Kräng plastpåsen över den använda pipen och kasta förpackningen.

