



Ögondroppstöd

endosbehållare

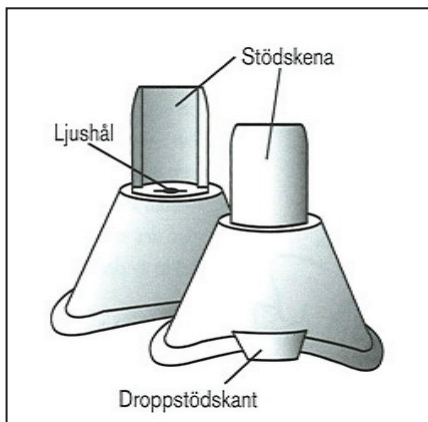

Droppstödet hjälper dig att använda ögondroppar i endosbehållare. Stödet gör det lättare att hålla behållaren rätt över ögat och ger därmed en säkrare dosering. För korrekt användning följ bruksanvisningen.

Bruksanvisning

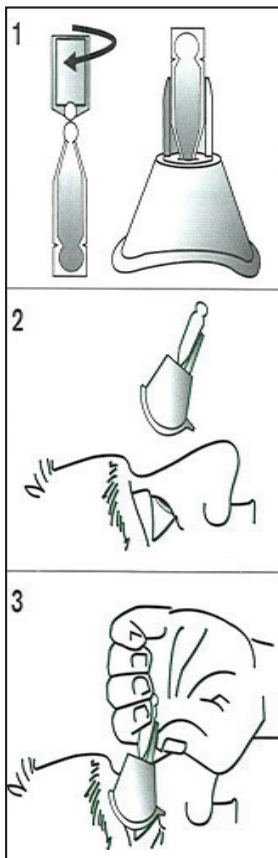

Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen. Placera behållaren i ljushålet längs med stödskenan på droppstödet.

Luta huvudet bakåt eller ligg på rygg. Håll droppstödet mellan tummen och pekfingeret och placera det rakt över ögat – utan att vidröra ögat – och för ner det undre ögonlocket med hjälp av droppstöds-kanten.

Håll ögat helt öppet och titta upp mot ljushålet. Tryck därefter lätt på behållaren så att en droppe pressas ut.

Behöver du droppa även i andra ögat, upprepa från bild 2.

Kasta den använda behållaren med eventuellt kvarvarande innehåll. Rengör droppstödet regelbundet genom att diska det med diskmedel och varmt vatten. Skölj ordentligt och låt torka.