



Ögondroppstöd

droppflaska

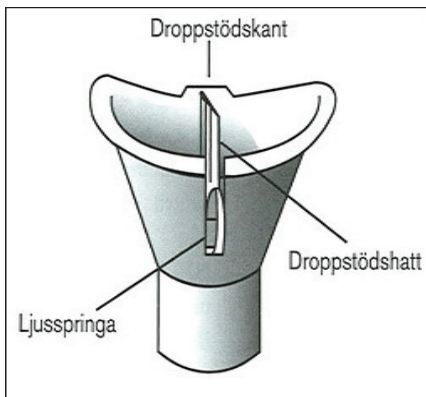

Droppstödet hjälper dig att använda ögondroppar i droppflaska. Stödet gör det lättare att hålla droppflaskan rätt över ögat och ger därmed en säkrare dosering. För korrekt användning följ bruksanvisningen.

Bruksanvisning

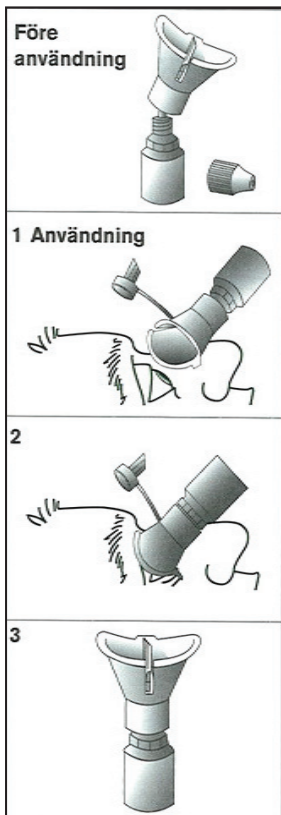

Skruva av locket och ställ flaskan på ett plant underlag. Tryck därefter droppstödet över flaskhalsen så att det sitter stadigt.

Tag av droppstödshatten och böj den bakåt. Luta huvudet bakåt eller ligg på rygg. Placera droppstödet rakt över ögat med ljusspringan uppåt – utan att vidröra ögat – och för ner det undre ögonlocket med hjälp av droppstöds-kanten.

Håll ögat helt öppet och titta upp mot ljusspringan. Tryck därefter lätt flaskan så att en droppe pressas ut.

Behöver du droppa även i andra ögat, upprepa från bild 1.

När droppningen är avslutad sätt på droppstödshatten. Droppstödet skall sitta kvar på flaskan under användningstiden.

Droppstödet bör rengöras med diskmedel och varmt vatten en gång per vecka samt vid byte till ny droppflaska. Skölj ordentligt och låt torka.